

## Instrukcja używania

# DEXOFTYAL® — MD

**Dexoftyal MD** to jałowe, lepkie, przezroczyste, nawilżające i odżywcze krople do oczu oparte na prowitaminie B5.

Prowitamina B5 wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki. Dzięki właściwościom mukoadhezyjnym HydraFlexu film łzowy jest zachowany tak, że powierzchnia oka jest lepiej chroniona.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

**Dexoftyal MD** chroni oko przed dolegliwościami takimi jak uczucie suchości i w przypadku zmęczonych i podrażnionych oczu. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu jest złagodzone lub całkowicie zredukowane.

**Dexoftyal MD** może być stosowany bez specjalnych ograniczeń i jest dobrze tolerowany.

### Skład:

Dekspantenol 2%, Hydroksypropylceluloza (HydraFlex) 0,5%; Poliheksanid 0,0001%

### Zastosowanie:

W przypadku podrażnienia lub pieczenia oczu, a także ich zaczerwienienia i uczucia zmęczenia, które mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak:

- podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych
- długotrwałe patrzenie na ekran bądź długotrwałe prowadzenie pojazdów: samochodu lub motocyklu
- klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, woda w basenie itp.

### Sposób stosowania:

**DEXOFTYAL MD** można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

**A: Bezpośrednio do oczu:** (osoby noszące szkła kontaktowe nie muszą ich wyjmować)

– przyłożyć palec wskazujący do dolnej powieki oka i lekko ją pociągnąć w dół

– posługując się drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; uważać, aby końcówka nie dotykała powierzchni oka!

– zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrunąć 2 lub 3 razy, aby preparat został równomiernie rozprowadzony na powierzchni całego oka

**B: Za pośrednictwem soczewek kontaktowych:**

– ułożyć soczewkę na środkowym palcu;

– nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę, a następnie włożyć soczewkę do oka;

– zamrunąć okiem 2 lub 3 razy.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Nie stosować razem z lekami do oczu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie używać w przypadku zakażenia oczu. Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników preparatu.

### Ostrzeżenia:

Nie stosować po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia.

Nie stosować po terminie ważności.

Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C.

Zamknąć butelkę bezpośrednio po użyciu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów lub podrażnienia, należy skontaktować się ze specjalistą.

### Działania uboczne:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu **Dexoftyal MD**.


### Opakowanie:

15 ml **Dexoftyal MD**


### Dystrybutor:

Verco S.A., Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa


### Objaśnienie użytych symboli:


 – Wyrób jałowy

 – Ostrzeżenia

 25°C  
4°C – Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C

 – Termin ważności

 – Numer serii

 – Znak zgodności

 – Wytwórca

### Wytwórca:

 TEGE Pharma B.V.  
Minervum 7384  
4817 ZH Breda, NL

  
JAKOŚĆ W OKULISTYCE

06REF1001  
DEXMD15/I/011118  
Data aktualizacji: 11/2018

 0344

